

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE CBCT

STUDIO _____	DATA _____
DOTTORE _____ _____	
TELEFONO _____ -	E-MAIL _____
NOME PAZIENTE _____ _____	

SI RICHIEDE SCANSIONE

MASCELLA	MANDIBOLA
----------	-----------

CHECK LIST

- VERIFICARE CHE IL PAZIENTE CALZI LA FORCHETTA RADIOLOGICA (DRS – DISPOSITIVO RADIOLOGICO STANDARD) CORRETTAMENTE
- VERIFICARE LA STABILITÀ DEL DRS E LA CORRETTA POSIZIONE IN CHIUSURA
- ASSICURARSI CHE IL PAZIENTE SIA IMMOBILE DURANTE L' ESAME
- ASSICURARSI CHE IL DRS SIA COMPLETAMENTE VISIBILE DOPO L'ACQUISIZIONE

PARAMETRI PER IL RADIOLOGO

- Acquisire il mascellare di interesse in modo completo
- Le immagini devono includere tutte le zone di interesse
- Acquisire secondo il piano orizzontale (Gantry a 0)
- Matrice di acquisizione: 512 x 512 pixel per ogni immagine
- Spessore 0,3 mm
- DICOM 3
- Multislices
- CD contenente solo Assiali Dicom
- Se l'esame comprende entrambi i mascellari, fornire due cartelle separate. Una per mascellare.